

Инструкция по осеменению

Размораживание:

Включаем термостат (водяную баню) и доводим температуру воды до **37-39°C**.

Подогреваем шприц для осеменения, поместив его под одежду до температуры тела (не используйте метод трения).

Достаньте соломинку из сосуда Дьюара предварительно охлажденным в азоте пинцетом. Слегка встряхните соломинку и как можно скорее поместите ее в термостат для оттаивания на **10-12 секунд**.

Выньте соломинку из воды и вставьте в заранее подогретый шприц, не теряя лишнего времени.

Отрежьте кончик соломинки, длиной 1 см от края, строго под углом 90 градусов.

Наденьте защитный чехол и санитарную рубашку на шприц.

Держите шприц под одеждой ближе к телу для поддержания тепла.

Подготовьте перчатки, смазку и бумагу/вату для очистки.

Соблюдайте как можно более короткий интервал между размораживанием семени и осеменением.

Осеменение:

Подойдите к корове спокойно. Приблизьтесь к корове спокойно.

Смажьте анальное отверстие смазкой.

Спокойно введите руку в прямую кишку. Убедитесь, что рукава закатаны достаточно высоко и одежда не мешает Вашей работе.

Очистите вульву чистой ватой или одноразовой салфеткой.

Аккуратно ведите шприц в шейку матки, затем медленно введите семя в область на границе конца шейки матки и матки. Важно правильно найти область для введения семени.

Аккуратно извлеките шприц.

Мягко и спокойно выньте руку из прямой кишки.

Запишите данные в журнал учета осеменений.

Подготовьте и обработайте в соответствующем порядке все использованные инструменты к последующему использованию.

Тип семени

Традиционное семя
0,25 мл

Сексированное семя
0,25 мл

Температура

ВОДЫ

37-39°C

Время

размораживания

10-12 секунд



INTERNATIONAL
GENETICS **RUS**

Наш адрес: 125371, г. Москва,
Волоколамское шоссе, 89.
Телефон/факс: +7 (495) 363-45-30,
+7 (495) 363-45-31
E-mail: crv.igr@gmail.com



genetic**AUSTRIA** GmbH