

# Инструкция по осеменению

## Размораживание:

Включаем термостат (водяную баню) и доводим температуру воды до **35-36°C**.

Подогреваем шприц для осеменения, поместив его под одежду до температуры тела (не используйте метод трения).

Достаньте соломинку из сосуда Дьюара предварительно охлажденным в азоте пинцетом. Слегка встряхните соломинку и как можно скорее поместите ее в термостат для оттаивания на **30 секунд**.

Выньте соломинку из воды и вставьте в заранее подогретый шприц, не теряя лишнего времени.

Отрежьте кончик соломинки, длиной 1 см от края, строго под углом 90 градусов.

Наденьте защитный чехол и санитарную рубашку на шприц. Держите шприц под одеждой ближе к телу для поддержания тепла.

Подготовьте перчатки, смазку и бумагу/вату для очистки.

Соблюдайте как можно более короткий интервал между размораживанием семени и осеменением. Используйте оттаявшие соломинки в течение максимум 15 минут.

## Осеменение:

Подойдите к корове спокойно. Приблизьтесь к корове спокойно.

Смажьте анальное отверстие смазкой.

Спокойно введите руку в прямую кишку. Убедитесь, что рукава закатаны достаточно высоко и одежда не мешает Вашей работе.

Очистите вульву чистой ватой или одноразовой салфеткой.

Аккуратно ведите шприц в шейку матки, затем медленно введите семя в область на границе конца шейки матки и матки. Важно правильно найти область для введения семени.

Аккуратно извлеките шприц.

Мягко и спокойно выньте руку из прямой кишки.

Запишите данные в журнал учета осеменений.

Подготовьте и обработайте в соответствующем порядке все использованные инструменты к последующему использованию.

## Тип семени

Традиционное семя  
0,25 мл

Сексированное семя  
0,25 мл

## Температура

### ВОДЫ

35-36°C

## Время

### размораживания

30 секунд



INTERNATIONAL  
GENETICS **RUS**

Наш адрес: 125371, г. Москва,  
Волоколамское шоссе, 89.  
Телефон/факс: +7 (495) 363-45-30,  
+7 (495) 363-45-31  
E-mail: crv.igr@gmail.com  
www.igr-bulls.ru

 aberekin